



呼吸道抗原五联检检测卡异常情况

编号	问题	可能原因	解决方案
1	一边液体没有跑	(1) 滴加样本时，滴入量过少； (2) 样本中含有血液/粘液/食物或其他杂质； (3) 滴加样本时，检测卡被移动； (4) 检测卡没有在平面上； (5) 检测卡长期暴露在高温/高湿环境中，操作时在高温/高湿/的环境中。	(1) 按照说明书滴加足够液体量，加样时应注意滴加到加样孔中； (2) 处理样本时应避免有血液/粘液/食物或其他杂质； (3) 测试过程中请勿移动检测卡； (4) 检测卡要放在平面上； (5) 调节环境温度为 15-30℃，避免阳光直射和强风直吹检测卡。
2	两边液体都没有跑	(1) 滴加样本时，滴入量过少； (2) 样本中含有血液/粘液/食物或其他杂质； (3) 滴加样本时，检测卡被移动； (4) 操作不当，将液体滴入到 NC 膜上； (5) 检测卡长期在高温/高湿环境中，操作时在高温/高湿/环境中。	(1) 按照说明书滴加足够液体量，加样时应注意滴加到加样孔中； (2) 处理样本时应避免有血液/粘液/食物或其他杂质； (3) 测试过程中请勿移动检测卡； (4) 调节环境温度为 15-30℃，避免阳光直射和强风直吹检测卡。
3	NC 膜整体背景偏红或者偏蓝	(1) 滴加样本时过快/过量了； (2) 样本中含有血液/粘液/食物或其他杂质； (3) 未按照要求时间读取结果，检测卡反应时间过长； (4) 操作时在高温/高湿环境中。	(1) 将液体垂直对准加样孔缓慢滴入，按照说明书滴加足够液体量； (2) 处理样本时应避免有血液/粘液/食物或其他杂质； (3) 结果解读应在 15-20mins，30 分钟之后无效； (4) 调节环境为温度 15-30℃，避免阳光直射和强风直吹检测卡。
4	NC 膜边上有波浪形残留	(1) 滴加样本时过快/过量了； (2) 样本中含有血液/粘液/食物或其他杂质； (3) 正常滴液之后又重复加样，导致二次层析； (4) 有水滴到 NC 膜上了； (5) 检测卡长期在高温/高湿环境中，操作时在高温/高湿环境中。	(1) 将液体垂直对准加样孔缓慢滴入，按照说明书滴加足够液体量； (2) 处理样本时应避免有血液/粘液/食物或其他杂质； (3) 本品为一次性使用产品，不可重复滴液； (4) 避免水滴入 NC 膜上； (5) 调节环境温度为 15-30℃，避免阳光直射和强风直吹检测卡。

Bioteke Corporation(Wuxi) Co., Ltd

5	在检测区域出现多条 T 线	(1) 可能存在多重感染; (2) 滴加样本时过快/过量了; (3) 样本中含有血液/粘液/食物或其他杂质; (4) 正常滴液之后又重复加样, 导致二次层析; (5) 未按照要求时间读取结果, 检测卡反应时间过长; (6) 检测卡长期在高温/高湿环境中, 操作时在高温/高湿环境中; (7) 滴加样本时, 检测卡被移动; (8) 未使用本公司配套试剂; (9) 未按照要求洗手, 检测卡被污染。	(1) 需根据临床症状进一步确定; (2) 将液体垂直对准加样孔缓慢滴入, 按照说明书滴加足够液体量; (3) 处理样本时应避免有血液/粘液/食物或其他杂质; (4) 本品为一次性使用产品, 不可重复滴液; (5) 结果解读应在 15-20mins, 30 分钟之后无效; (6) 调节环境温度为 15-30℃, 避免阳光直射和强风直吹检测卡; (7) 测试过程中请勿移动检测卡; (8) 需要使用本公司配套试剂; (9) 按照说明书规范操作。
6	在上面视窗的下端和下面视窗的上端存在显色线条的现象	(1) 滴加样本时过快/过量了; (2) 样本中含有血液/粘液/食物或其他杂质; (3) 滴加样本时, 检测卡被移动; (4) 检测卡长期在高温高湿环境中, 操作时在高温/高湿环境中; (5) 未使用本公司配套试剂; (6) 未按照要求洗手, 检测卡被污染。	(1) 将液体垂直对准加样孔缓慢滴入, 按照说明书滴加足够液体量; (2) 处理样本时应避免有血液/粘液/食物或其他杂质; (3) 测试过程中请勿移动检测卡; (4) 调节环境温度为 15-30℃, 避免阳光直射和强风直吹检测卡; (5) 需要使用本公司配套试剂; (6) 按照说明书规范操作。